



Erich Voss GmbH

Arbeitssicherheit · Arbeitsmedizin

# VOSS Augen- und Wunddusche

dauerhaft steril aus der Sprühdose, sprüht aus allen Winkeln.



## Sprühdose mit patentiertem "BAG IN CAN SYSTEM"

Inhalt: 200 mL steriles NaCl 0,9% (isotonische Lösung) · Auch als Phosphatpuffer · Zur Spülung von Augen und Wunden · Auch nach der Verwendung steril, mehrfach verwendbar. · Die Anwendung ist aus jedem Winkel möglich. · Weicher, gut appliyierbarer Strahl. · max. 3 Jahre steril, auch nach Verwendung · Zwei verschiedene Sprühdöpfe verfügbar · Umweltfreundliches Treibgas Stickstoff · Beschreibung und Anwendung s.Rückseite

Wieder ein Innovatives Produkt der VOSS GmbH



Erich Voss GmbH

Arbeitssicherheit · Arbeitsmedizin

# VOSS Augen- und Wunddusche



Sprühdose mit patentiertem "BAG IN CAN SYSTEM".  
Inhalt: 200 mL NaCl 0,9% (isotonische Lösung) zur  
Spülung von Augen und Wunden nach Oberflächen-  
Verletzungen, Augenverunreinigungen etc.

Schnelle Soforthilfe zur äußeren Anwendung. Im  
Gegensatz zu konventionellen Augenspülungen bleibt  
VOSS Augen- und Wundspülung **auch nach der  
Verwendung steril und ist somit mehrfach  
verwendbar.** (max 3 Jahre)

Durch das Bag inCanSystem kann keine  
Verunreinigung in den unter Überdruckstehenden  
Beutel eindringen, der mit umweltfreundlichen  
Treibgas (Stickstoff) umschlossen ist. Dies hat zwei  
weitere Vorteile: der Wirkstoff kommt nicht in  
Berührung mit dem Treibgas, und die Anwendung ist  
aus jedem Winkel möglich.

Einfach vor der Anwendung kurz in die Luft sprühen  
(Düsenreinigung), dann ist VOSS Augen- und  
Wundspülung einsatzbereit. Durch den Salzgehalt ist  
der osmotische Druck dem der menschlichen  
Tränenflüssigkeit und Zellen ähnlich und schließt  
Transport durch Diffusion aus.



(zzgl MwSt)

Bei extremen **Verätzungen** (Batterieexplosion,  
Flußsäure o.ä.) muß mit großer Menge gespült werden,  
um Verunreinigungen auch aus den angrenzenden  
Haarbereichen auszuspülen. Für diese Fälle ist eine  
Behandlung mit großen Behältnissen indiziert, z.B.  
SYSTEM FOX Augenspülflasche oder auch einfaches  
Wasser im Eimer o.ä.. Danach sind Phosphatpuffer wie  
etwa STERIFLOW, V-OCULAV oder das **VOSS  
SOFTPUFFER-spray** das Mittel der Wahl und sollten  
bevorzugt werden. Der SOFTPUFFER ist die Symbiose  
aus mit wenig Chemie versetzter Spülung und einem  
neutralisierenden Stoff. Damit kann dauerhaft gespült  
werden, ohne die Gesundheit des Auges zu  
beeinträchtigen (s. Bild rechts)

Bestellnummern:

Als 0.9% Kochsalz: WAD200 Als Phosphatpuffer:  
WADPP200

**Phosphatpuffer: neutralisiert Säuren UND  
Laugen**



Erich Voss GmbH

Arbeitssicherheit · Arbeitsmedizin

Lerchenfeld 23 · 25436 Heidgraben

Telefon: (04122) 9789-0

Telefax: (04122) 43012

info@voss GmbH · www.voss GmbH.de